



LUVIN UNIVERSE

Documento: istruzioni d'uso

Redatto	Verificato	Approvato
GIUSEPPE DI MARTINO	FURONE MARIANNA, HUANG MAX	CHEN XIAOLI
Data: 19.06.2025	Data: 24.06.2025	Data: 24.06.2025

REVISIONI		
Revisione	Motivo della revisione	Data
0	Prima emissione	Gugno 2025
1	Rinnovo	Maggio 2026

Istruzioni per l'Uso

Indossamento:

- Controllare l'integrità della confezione e dei guanti prima dell'uso.
- Le mani devono essere pulite prima di indossare i guanti.
- Indossare i guanti nell'ordine corretto per evitare la trasmissione di infezioni.
- Estrarre i guanti dalla confezione. Una volta estratto il primo guanto dalla confezione, indossarlo toccando con attenzione solo l'area del polsino.
- Estrarre il secondo guanto con l'altra mano e indossarlo toccando con attenzione solo l'area del polsino.
- Prima dell'uso, assicurarsi che i guanti calzino correttamente per poterli indossare comodamente.
- Una volta indossati i guanti, non toccare nulla che possa contaminare i guanti.
- Evitare strappi: oggetti appuntiti o taglienti possono perforare i guanti. Gli strappi possono causare schizzi di contaminanti negli occhi, nella bocca, sulla pelle o su persone vicine.

Rimozione:

- Durante la rimozione dei guanti, evitare il contatto tra la superficie esterna dei guanti e la pelle, poiché la superficie potrebbe essere contaminata da sangue o altri fluidi corporei.
- Utilizzando la mano dominante, l'utilizzatore deve iniziare afferrando la parte esterna del guanto della mano non dominante sul lato del palmo vicino al polsino.
- Sfilare il guanto dalla mano non dominante e riporlo nella mano guantata, accartocciandolo.
- Inserire due dita sotto il polsino dell'altro guanto e sfilarlo con attenzione dalla mano senza toccare il polso, rivoltando il guanto rimanente al contrario durante la rimozione e racchiudendo al suo interno il primo guanto.
- I guanti possono essere smaltiti.
- Non utilizzare in caso di difetti visibili quali nitrile danneggiato o perforato.
- Utilizzare secondo necessità e fino al deterioramento del dispositivo (strappi, danni, ecc.). In ogni caso, non utilizzare per più di 6/8 ore.

Istruzioni Aggiuntive

- Questo prodotto è esclusivamente monouso e non deve essere riutilizzato. Smaltire sempre e sostituire immediatamente il prodotto dopo la rimozione.
- Il prodotto non può essere lavato, asciugato o stirato.